


SCHEMA TECNICA

WI_ST 16000_VISIERA PROTETTIVA

NOME PRODOTTO	VISIERA PROTETTIVA
----------------------	--------------------

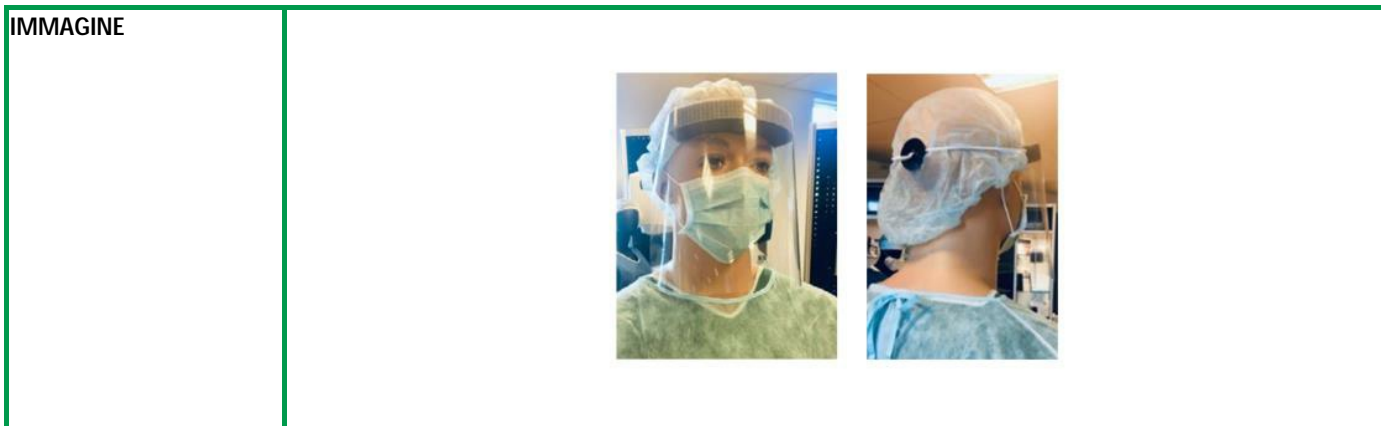

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>Visiera protettiva con lo scopo di proteggere viso e occhi da schizzi e spray di fluidi potenzialmente dannosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visiera trasparente in PET - Fascia elastica regolabile - Taglia unica - Monouso <p>Indicazioni per l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con una mano tenere la visiera appoggiata al viso nella posizione finale, con l'altra mano tirare gli elastici dietro la nuca - Sistemare la lunghezza degli elastici aggiustando la chiusura. Evitare di modificare la lunghezza degli elastici molte volte, per evitare che la chiusura della fibbia perda di efficacia <p>Pulizia e igiene:</p> <p>L'aparte trasparente in plastica (PET) può essere pulita usando un panno umido con disinfettante: è raccomandato l'etanolo. La plastica del visore e la spugna hanno un'ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze disinfettanti.</p> <p>N.B. Non immergere o imbibire la spugna in alcol o disinfettanti, l'adesivo che fissa la spugna al visore potrebbe dissolversi. Limitarsi a spruzzare una piccola quantità di disinfettante.</p>
--	--

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1999901579	VISIERA PROTETTIVA Confezione 100 pezzi

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE
Abena A/S Egelund A 35 6200 Aabenraa DK

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio